

KENNEDY II


инструкция по эксплуатации



Инструкция по эксплуатации KENNEDY II (Кеннеди II)

Содержание

- Инструкции по безопасности
- Медицинские показания
- Инструкции по уходу
- Условия предоставления гарантии
- Начало работы
- Технические данные
- Детали конструкции
- Пульт дистанционного управления
- Устранение неисправностей и техническое обслуживание
- Функциональность
- Соответствие стандартам

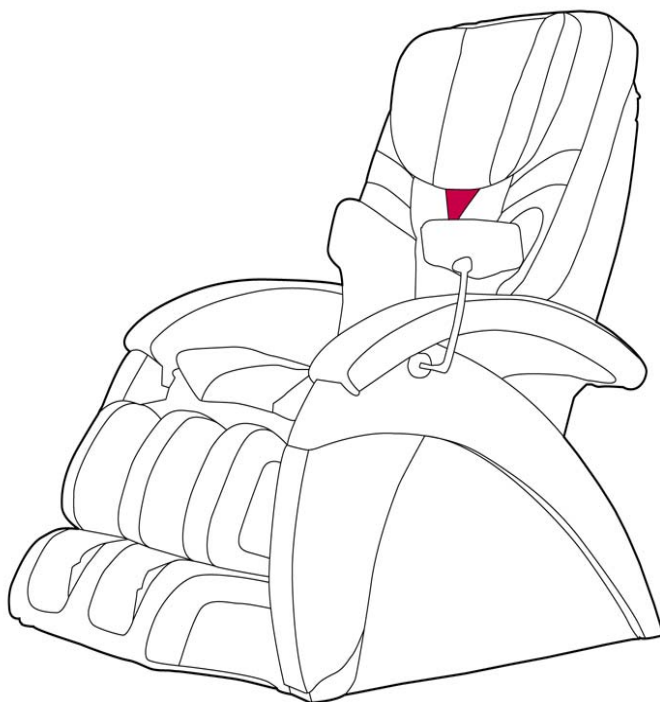

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Купив массажное кресло, Вы подтвердили, что заботитесь о своем здоровье. Чтобы долгое время наслаждаться достоинствами данной системы, внимательно прочитайте инструкции по безопасности.

Надеемся, что Вы прекрасно проведете время с массажным креслом **KENNEDY II**.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом использования массажного кресла внимательно прочитайте данные инструкции по безопасности. Если Вы страдаете каким-либо из перечисленных ниже заболеваний, перед использованием кресла проконсультируйтесь с врачом.

- Заболевания в стадии обострения;
- Заболевания сердечно-сосудистой системы;
- Онкологические заболевания;
- Остеопороз;
- Нарушения восприятия;
- Прохождение курса лечения;
- Беременность;
- Инвалидность.

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание несчастных случаев не прикасайтесь к массажным механизмам во время их работы.

- Не пытайтесь вскрывать кресло самостоятельно.
- Если при использовании кресла Вы почувствовали боль, немедленно обратитесь к врачу.
- Во избежание поражения электрическим током или получения иных травм, всегда контролируйте использование кресла детьми.
- Не храните и не используйте кресло в местах повышенной влажности и температурного режима.
- Не используйте поврежденные штекеры, кабели или неисправные розетки. Замена поврежденных штекеров или кабелей производится фирмой-изготовителем, представителями сервисной службы или квалифицированными специалистами.
- Не крутитесь на кресле, не перетаскивайте его по полу и избегайте ударов. Не кладите на кресло тяжелые предметы.
- После использования или в случае, когда креслом не пользуются в течение долгого времени, отключите кресло от питания во избежание опасности поражения электрическим током, возникновения короткого замыкания или возгорания.
- В случае возникновения неисправности немедленно отключите кресло от сети питания.
- Не трогайте штекер мокрыми руками.
- Не пользуйтесь массажным креслом непосредственно после еды, так как это может вызвать тошноту.

Рекомендованное время массажа — 30 минут. Не используйте кресло более 30 минут во избежание чрезмерного стимулирования мышц и нервной системы.



МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

Если Ваш врач/ортопед не запрещает массаж спины, то Вы можете спокойно пользоваться массажным креслом.

Интенсивность массажа повышается, если кресло приведено в горизонтальное положение. Рекомендуем начать массаж в положении сидя.

Массаж должен доставлять удовольствие и быть приятным.

ВНИМАНИЕ!!!

Чрезмерный массаж может нанести вред Вашему здоровью.

Не рекомендуется использование массажного кресла беременными, лицами с ослабленным здоровьем и детьми. При нарушениях позвоночника или после операций массаж может быть опасен. При любых сомнениях проконсультируйтесь с врачом.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Вы приобрели изделие, изготовленное из высококачественных материалов. Такая продукция требует соответствующего ухода. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и влаги на кресло.

Советуем производить регулярный уход за массажным креслом рекомендованными средствами с целью продления срока его службы.



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Дилер соблюдает предоставляемый по закону гарантийный период на продукцию, описание которой содержится в данном руководстве. Гарантийный период начинается с даты покупки, указанной на товарном чеке.

Дилер обязуется бесплатно предоставлять услуги по ремонту и замене неисправных изделий, приобретенных в Германии, за исключением таких быстроизнашивающихся деталей, как тканевое покрытие. Неисправное устройство вместе с товарным чеком необходимо предоставить до конца гарантийного периода.

Гарантия недействительна, если дефекты возникли в результате воздействия внешних факторов, ремонта или изменений, произведенных не фирмой-изготовителем или неавторизованным дилером.

Гарантия, предоставляемая продавцом, ограничивается ремонтом или заменой изделия. В отношении гарантии фирма-изготовитель/дилер не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате несоблюдения инструкций по эксплуатации и/или в результате неправильного применения изделия. Если в ходе проверки изделия фирмой-изготовителем будет выявлено, что претензия по гарантии не относится к неисправностям, на которые распространяется гарантия, или что гарантийный период истек, покупатель несет все расходы на проверку и ремонт продукции.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом работы убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на сетевом штепселе. Подсоедините кабель питания к спинке кресла, а затем поместите штекер в розетку питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры: 145 x 125 x 78 см

В разложенном состоянии: 202 см.

Угол наклона спинки: 160°

Вес: 107 кг

Напряжение: AC~220-240 В, 50Гц, 220 Вт



Время работы в автоматическом режиме: 15 мин

Время работы в ручном режиме: 30 мин

Сертификаты:



ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ



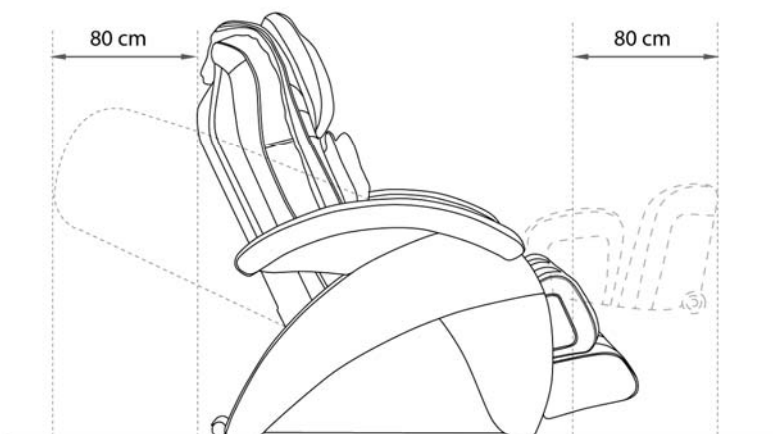
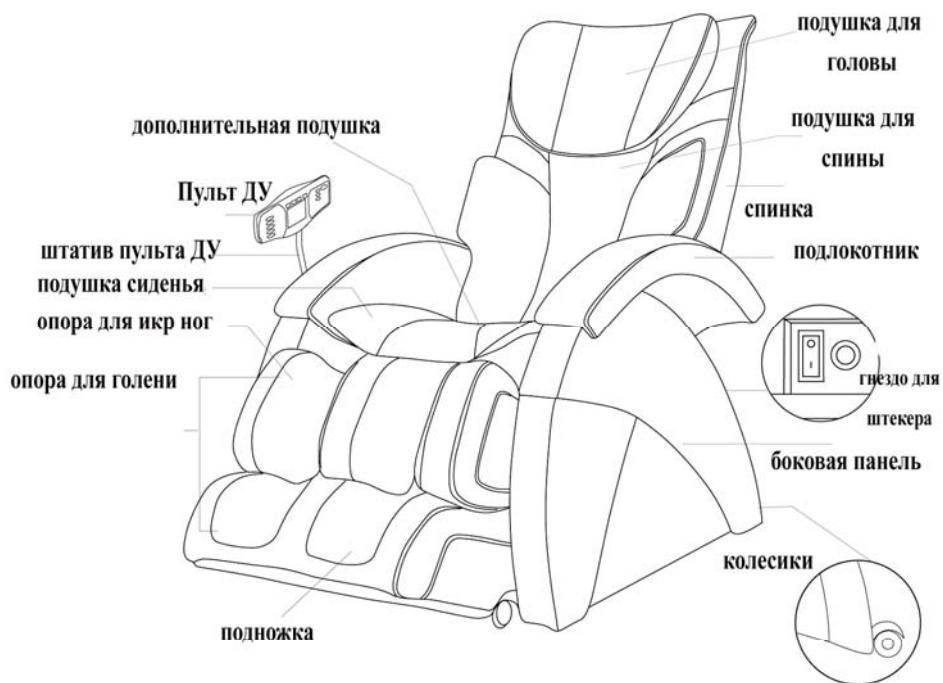


ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ


Подсоединение сетевого кабеля: вставьте штекеры в соответствующие разъемы в сиденье согласно указанным обозначениям

Черный-черный

Серый-серый

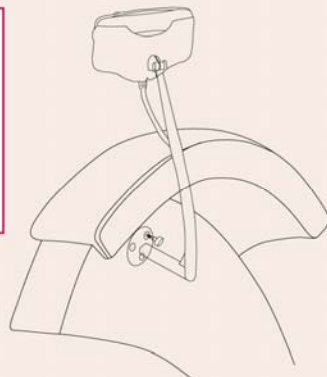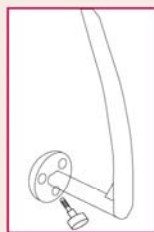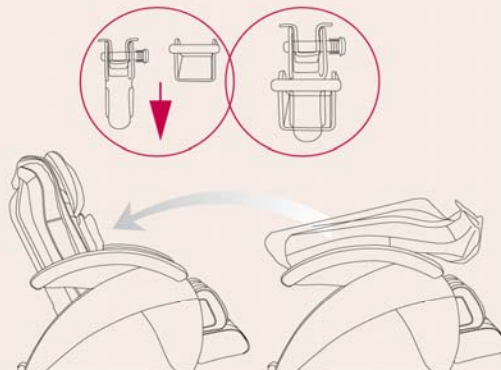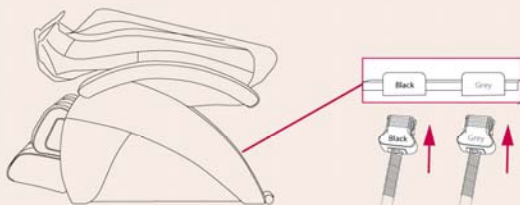


Подушки для спины соединяются при помощи молнии.

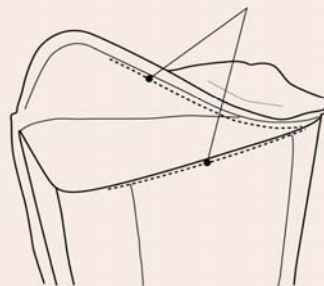

Вид спереди

Вид сзади


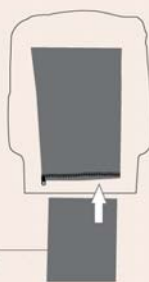


Вкладыш для контроля силы массажа при массаже спины

Вкладыш для контроля силы массажа при массаже спины помещается в чехол подушки для спины. Если Вы хотите увеличить силу массажа, выньте вкладыш из чехла. Если Вам требуется более мягкий массаж, поместите вкладыш в чехол.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

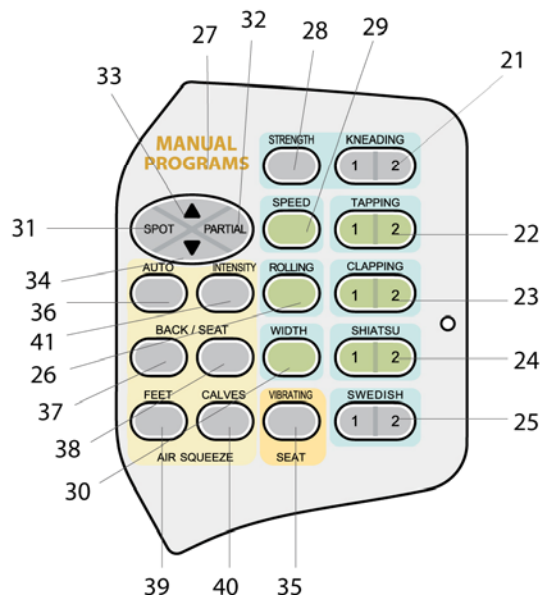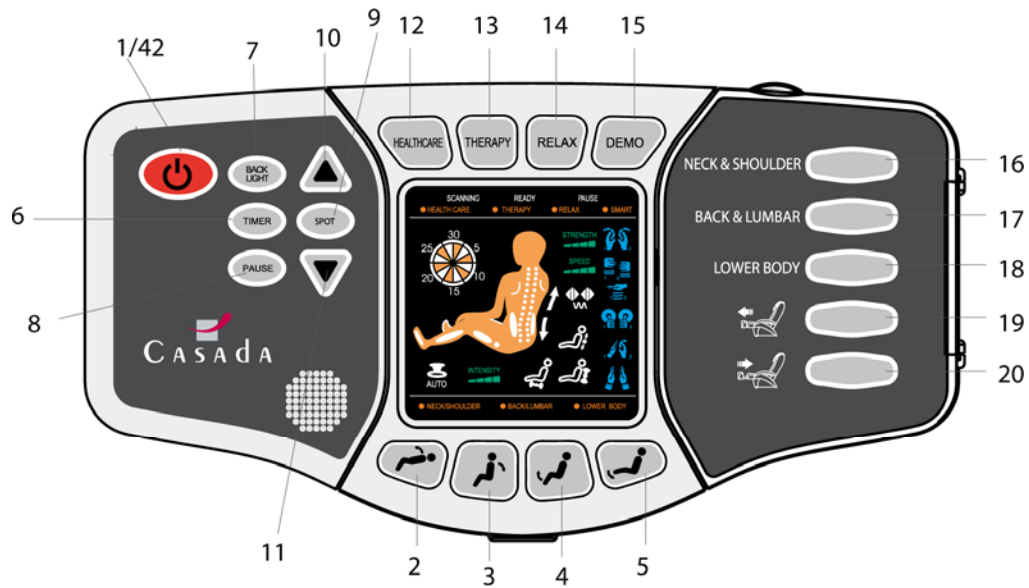

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. On/Off (Вкл./Выкл.)

Кнопка управления запуском

Однократное нажатие этой кнопки включает подсветку пульта в мерцающем режиме: система массажного кресла **Kennedy II** переходит в режим ожидания. Чтобы начать сеанс массажа, нажмите кнопку выбранной программы массажа, при этом активируется таймер отсчета времени. При повторном нажатии кнопки *On/Off* (Вкл./Выкл.) сеанс массажа завершается. Все массажные ролики возвращаются в первоначальную позицию.

2. 3. Наклон назад / Прямая позиция

Кнопка регулировки угла наклона

Эти две кнопки позволяют отрегулировать угол наклона: «наклон назад» и «прямая позиция». Нажмите кнопки «наклон назад» или «прямая позиция» для приведения спинки и подножки кресла в удобное положение. Нажмите кнопки «наклон назад», «прямая позиция», «поднять подножку» или «откинуть подножку» еще раз, чтобы закрепить выбранное положение.

4. 5. Поднять подножку / Откинуть подножку

Кнопка регулировки угла наклона ног

Эти две кнопки позволяют отрегулировать угол наклона опоры для ног. Нажмите один раз кнопку «поднять подножку» или «откинуть подножку», опора для ног сама примет нужное положение, затем повторно нажмите кнопки «наклон назад», «прямая позиция», «поднять подножку» или «откинуть подножку», чтобы закрепить выбранное положение.

6. Timer (Таймер)

Установка времени

Таймер включается автоматически при запуске системы **Kennedy II**, время, установленное на таймере, составляет 15 мин. При повторном нажатии на эту кнопку время продолжительности сеанса массажа меняется в следующей последовательности: «20>25>30>5>10>15» минут.

Примечание: Когда до конца выбранного сеанса массажа остается 1 минута, автоматически включается подсветка пульта управления, затем раздаются 5 предупреждающих звуковых сигнала.

7. Backlight (Подсветка)

Вкл./выкл. подсветки пульта управления

Каждое нажатие этой кнопки включает или выключает подсветку пульта управления. Подсветка автоматически выключается через 4 минуты.

8. Pause (Пауза)

Кнопка «Пауза»

При нажатии этой кнопки процесс массажа прерывается, и система переходит в режим ожидания. Для возобновления работы нажмите на эту кнопку еще раз.

9. Spot (Точка)

Кнопка управления функции массажа определенной точки в области спины

При помощи этой кнопки пользователь может выбрать функцию массажа для любой точки спины, стрелки «вверх» и «вниз» помогают пользователю отрегулировать функцию массажа определенной точки спины, исходя из его пожеланий.

10. 11. Стрелки «вверх» и «вниз»

Кнопки регулировки уровня при массаже спины.

Для более комфортного и тщательного массажа пользователь может настроить область массажа по высоте путем нажатия стрелки «вверх» или «вниз» в течение 5 сек. после звукового сигнала. Массажные ролики будут перемещаться вверх или вниз по Вашему выбору, пока не будет установлено подходящее для Вас положение. Положение массажа устанавливается, когда Вы отпускаете кнопку, завершив ручную настройку.



Автоматические программы

При запуске автоматических программ можно запустить функцию вибрации в области спины и ягодиц, исходя из ваших пожеланий.

А. Автоматические программы массажа всего тела

Если какая-либо из четырех автоматических программ запущена до проведения автоматического сканирования всего тела, система автоматически проведет сканирование спины для определения необходимой высоты. В то же время пользователь может вручную установить предпочитаемый уровень высоты проведения массажа. Можно выбрать одну из следующих автоматических программ:

- 12. Healthcare (Забота о здоровье)
- 13. Therapy (Терапевтическая программа)
- 14. Relax (Программа расслабления)
- 15. Demo (Демонстрационная программа)

В. Автоматические программы локализованного массажа

Данные программы позволяют провести сеанс массажа определенной части тела в целях достижения лучшего местного эффекта.

- 16. Neck & Shoulder (Кнопка запуска режима массажа области шеи и плеч)
- 17. Back & Lumbar (Кнопка запуска режима массажа области спины и поясницы)
- 18. Lower Body (Кнопка запуска режима массажа нижней части тела (бедер, икр и ступней))

Примечание:

Можно объединить автоматический массаж области шеи и плеч или области спины и поясницы с автоматическим массажем нижней части тела. Однако объединить автоматический массаж области шеи и плеч и массаж области спины и поясницы невозможно.

19. 20. Кнопки регулировки длины подножки

С помощью этих кнопок можно отрегулировать длину подножки, для этого нажмите на кнопки «выдвинуть» или «убрать». Повторно нажмите на кнопки «выдвинуть» или «убрать», чтобы закрепить выбранное положение.

Ручной выбор режима массажа спины

21. Kneading (Разминающий массаж)

Кнопка включения/выключения режима разминающего массажа: 2 варианта режима, 4 уровня силы массажа. Однократное нажатие кнопки *Kneading 1* (Разминающий массаж 1) или *Kneading 2* (Разминающий массаж 2) запускает режим разминающего массажа для всей области спины на средней скорости, чтобы остановить сеанс массажа, нажмите кнопку еще раз. После нажатия кнопки *Kneading 1* (Разминающий массаж 1) или *Kneading 2* (Разминающий массаж 2) вариант режима можно изменить, нажав кнопку *Kneading 2* (Разминающий массаж 2) или *Kneading 1* (Разминающий массаж 1) соответственно.

Примечание: Разминающий массаж может комбинироваться с поколачивающим / похлопывающим / шиацу, чтобы Вы могли насладиться различными видами массажа одновременно. Нажмите эту кнопку, и массажное кресло Kennedy II вкратце продемонстрирует Вам свои особенности.



22. Tapping (Поколачивающий массаж)

Кнопка включения/выключения режима поколачивающего массажа: 2 варианта режима, 3 зоны воздействия по ширине, 4 уровня скорости массажа. Однократное нажатие кнопки *Tapping 1* (Поколачивающий массаж 1) или *Tapping 2* (Поколачивающий массаж 2) запускает режим поколачивающего массажа для всей области спины на средней скорости, нажмите эту кнопку еще раз и при помощи кнопки *Width* (Регулировка ширины) отрегулируйте зону воздействия по ширине, после чего, не прекращая сеанс, снова нажмите кнопку включения/выключения режима поколачивающего массажа. После нажатия кнопки *Tapping 1* (Поколачивающий массаж 1) или *Tapping 2* (Поколачивающий массаж 2) вариант режима можно изменить, нажав кнопку *Tapping 2* (Поколачивающий массаж 2) или *Tapping 1* (Поколачивающий массаж 1) соответственно.

23. Clapping (Похлопывающий массаж)

Кнопка включения/выключения режима похлопывающего массажа: 2 варианта режима, 3 зоны воздействия по ширине, 4 уровня скорости массажа. Однократное нажатие кнопки *Clapping 1* (Похлопывающий массаж 1) или *Clapping 2* (Похлопывающий массаж 2) запускает режим похлопывающего массажа для всей области спины на средней скорости, нажмите эту кнопку еще раз и при помощи кнопки *Width* (Регулировка ширины) отрегулируйте зону воздействия по ширине, после чего, не прекращая сеанс, нажмите кнопку включения/выключения режима похлопывающего массажа еще раз. После нажатия кнопки *Clapping 1* (Похлопывающий массаж 1) или *Clapping 2* (Похлопывающий массаж 2) вариант режима можно изменить, нажав кнопку *Clapping 2* (Похлопывающий массаж 2) или *Clapping 1* (Похлопывающий массаж 1) соответственно.

24. Shiatsu (Шиацу)

Кнопка включения/выключения режима массажа шиацу: 2 варианта режима, 3 зоны воздействия по ширине, 4 уровня скорости массажа. Однократное нажатие кнопки *Shiatsu 1* (Шиацу 1) или *Shiatsu 2* (Шиацу 2) запускает режим массажа шиацу для всей области спины на средней скорости, нажмите эту кнопку еще раз и при помощи кнопки *Width* (Регулировка ширины) отрегулируйте зону воздействия по ширине, после чего, не прекращая сеанс, нажмите кнопку включения/выключения режима массажа шиацу еще раз. После нажатия кнопки *Shiatsu 1* (Шиацу 1) или *Shiatsu 2* (Шиацу 2) вариант режима можно изменить, нажав кнопку *Shiatsu 2* (Шиацу 2) или *Shiatsu 1* (Шиацу 1) соответственно.

25. Swedish (Шведский массаж) (легкий разминающий + легкий поколачивающий массаж)

Кнопка включения/выключения режима шведского массажа: 2 варианта режима. Однократное нажатие кнопки *Swedish 1* (Шведский массаж 1) или *Swedish 2* (Шведский массаж 2) запускает функцию шведского массажа для всей области спины на средней скорости, чтобы остановить сеанс массажа, нажмите кнопку еще раз. После нажатия кнопки *Swedish 1* (Шведский массаж 1) или *Swedish 2* (Шведский массаж 2) вариант режима можно изменить, нажав кнопку *Swedish 2* (Шведский массаж 2) или *Swedish 1* (Шведский массаж 1) соответственно.

26. Rolling (Роликовый массаж)

Кнопка включения/выключения режима роликового массажа: 3 зоны воздействия по ширине (узкая, средняя, широкая). Однократное нажатие кнопки запускает режим роликового массажа. Нажмите эту кнопку еще раз и при помощи кнопки *Width* (Регулировка ширины) отрегулируйте зону воздействия по ширине, после чего, не прекращая сеанс, нажмите кнопку включения/выключения режима шведского массажа еще раз.

Примечание:

1. Функция роликового массажа не предназначена для массажа определенной области спины.
2. Режимы разминающего / похлопывающего / шиацу / шведского / роликового массажа не комбинируются.

27. Vibration (Вибрация)

Кнопка включения/выключения режима вибрации: 2 варианта режима. Однократное нажатие кнопки запускает функцию вибрационный режим для всей области спины, чтобы остановить сеанс массажа, нажмите кнопку еще раз.



28. Strength (Сила)

Кнопка регулировки скорости разминающего массажа. После запуска режима разминающего массажа при каждом нажатии этой кнопки можно отрегулировать скорость.

29. Speed (Скорость)

Кнопка регулировки скорости массажа для режимов поколачивающего, похлопывающего массажа и шиацу. После запуска режима поколачивающего, похлопывающего массажа и шиацу при каждом нажатии этой кнопки можно отрегулировать скорость.

30. Width (Ширина)

Кнопка регулировки ширины зоны воздействия для режимов поколачивающего, похлопывающего, шведского, роликового массажа и шиацу. После запуска режима поколачивающего, похлопывающего, шведского, роликового массажа и шиацу при каждом нажатии этой кнопки можно отрегулировать ширину зоны воздействия.

Функция массажа определенной точки или локализованный массаж спины

31. Spot (Точка)

Массаж определенной точки или локализованный массаж спины

С помощью кнопки *Spot* (Точка) Вы можете массировать любую точку спины, отрегулировав область воздействия стрелками «вверх» и «вниз» по своему желанию. Однократное нажатие этой кнопки запускает режим массажа определенной точки, при этом кресло продолжает работать в первоначальном режиме. Повторным нажатием кнопки Вы можете прекратить массаж определенной точки спины и возобновить массаж всей спины.

32. Partial (Частичный).

Массаж определенной части спины

С помощью этой кнопки Вы можете настроить режим массажа любой части спины, отрегулировав область воздействия стрелками «вверх» и «вниз». При однократном нажатии этой кнопки кресло продолжает работать в первоначальном режиме, при этом запускается массаж определенной части, начиная с центральной, ширина зоны воздействия около 8 см. Повторным нажатием кнопки Вы можете прекратить массаж определенной части спины и возобновить массаж всей спины.

33. 34. Стрелки «вверх» и «вниз».

Кнопки регулировки при массаже определенной точки или части спины

После запуска режима массажа определенной точки или части спины нажмите кнопки «вверх» или «вниз», чтобы отрегулировать область воздействия. Массажные ролики будут перемещаться вверх или вниз, пока не будет выбрана требуемая часть. Новая позиция будет считаться начальной областью воздействия при массаже определенной точки или части спины. Когда требуемая область массажа выбрана, отпустите кнопки «вверх» или «вниз».

Установка режима вибрации в области ягодиц

35. Vibration (Вибрация)

Кнопка включения/выключения режима вибрации

Однократное нажатие этой кнопки запускает режим вибрации в области ягодиц. Чтобы остановить выполнение этой функции, нажмите на кнопку еще раз.



Установка режима воздушного массажа

36. Auto (Автоматический режим)

Кнопка запуска режима автоматического воздушного массажа

Нажатие этой кнопки запускает режим автоматического воздушного массажа в области спины, ягодиц, ступней и икр. Для установки одного из четырех уровней интенсивности воздушного массажа нажмите кнопку *Intensity* (Интенсивность).

37. 38. Back/Seat (Спина/ягодицы)

Кнопка включения/выключения воздушного массажа спины и ягодиц

Однократное нажатие кнопки *Back/Seat 1* (Спина/Ягодицы 1) или *Back/Seat 2* (Спина/Ягодицы 2) запускает режим воздушного массажа для спины и ягодиц. Чтобы остановить сеанс воздушного массажа, нажмите кнопку еще раз. После нажатия кнопки *Back/Seat 1* (Спина/Ягодицы 1) или *Back/Seat 2* (Спина/Ягодицы 2) вариант режима воздушного массажа можно изменить, нажав кнопку *Back/Seat 1* (Спина/Ягодицы 1) или *Back/Seat 2* (Спина/Ягодицы 2) соответственно.

39. Feet (Ступни)

Кнопка включения/выключения режима воздушного массажа в области ступней: 4 уровня интенсивности. Однократное нажатие кнопки запускает режим воздушного массажа в области ступней. Чтобы остановить сеанс воздушного массажа ступней, нажмите кнопку еще раз.

40. Calves (Икры)

Кнопка включения/выключения режима воздушного массажа в области икр: 4 уровня интенсивности. Однократное нажатие кнопки запускает режим воздушного массажа в области икр. Чтобы остановить сеанс воздушного массажа икр, нажмите кнопку еще раз.

41. Intensity (Интенсивность)

Регулировка интенсивности воздушного массажа

После запуска режима воздушного массажа нажмите эту кнопку для регулировки интенсивности воздушного массажа, выбрав один из четырех уровней интенсивности.

Примечание: Режим вибрации / воздушного массажа может комбинироваться с разминающим / поколачивающим / похлопывающим массажем / шиацу, чтобы Вы могли насладиться различными видами массажа одновременно.

Завершение работы

Для завершения работы нажмите кнопку *On/Off* (Вкл./Выкл.). Все массажные ролики возвращаются в первоначальную позицию. Затем переключите кнопку питания под креслом в положение «О» и выньте штекер из розетки.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Данное массажное кресло снабжено микрокомпьютером и чувствительно даже к небольшим (+10% или -15%) скачкам напряжения. В ходе работы могут возникнуть следующие неисправности:

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Массажное кресло работает с паузами, хотя подсоединено к сетевому питанию.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Проверьте состояние и подключение кабеля. 2) Проверьте, переключена ли кнопка питания под креслом в положение «I».
Во время работы контроллер работает, массажное кресло не функционирует.	Массажное кресло могло перегреться в результате продолжительного использования. Оно охлаждается автоматически и возвращается в обычное рабочее состояние. Выключите кнопку, переведя ее в положение OFF (Выкл.) и дайте креслу остыть в течение 30-50 мин.
Во время работы ни контроллер, ни массажное кресло не функционируют.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Если закончилось время, установленное на таймере, снова нажмите кнопку установки времени на таймере для возобновления работы. 2) Выключите кнопку, переведя ее в положение OFF

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для чистки кресла не используйте воду и другие чистящие средства;
- Не тащите кресло по полу резкими движениями;
- Не кладите на кресло тяжелые предметы, не прокалывайте и не разрезайте поверхность кресла;
- Во время сеанса массажа нажимайте на кнопки мягко, избегайте ударов тяжелыми предметами;
- Вынимайте штекер из розетки после выключения кресла;
- Рекомендованное время массажа — 30 минут.



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

- + Массажное кресло **KENNEDY II** сочетает в себе проверенное качество и интеллектуальный дизайн;
- + Обладает расслабляющим эффектом;
- + Благодаря специально разработанной программе массажа и функции автоматического сканирования тела, массаж может осуществляться с учетом индивидуальных потребностей.
- + Дополнительной уникальной функцией массажного кресла является акупрессурный массаж области спины, ягодиц, нижних конечностей (икр, ступней).
- + Особенностью кресла также являются датчики, установленные в основании кресла, которые осуществляют автоматическую настройку в зависимости от роста пользователя.



Продукция соответствует европейским директивам

LVD0707213 (EMF)

LVD0707212 (LVD)

EMC0707211 (EMC)

Авторское право

Рисунки и текст являются предметом авторского права «Касада групп ГмбХ», их использование в иных целях без разрешения владельца запрещено.

Авторское право

(с) 2008 «Касада групп ГмбХ»
Все права защищены.

«Касада групп ГмбХ»
Обермайерс фельд 3
33104 Падерборн, Федеративная Республика Германия
Тел. (+49) (0 52 54) 9 30 98-0
Факс (+49) (0 52 54) 9 30 98-30
Email: info@casada.de



